


epocNXS Software-Update über EDM-Lite

1.0 Update mit Internetverbindung


1.1 Software-Update epoc:

Sie erhalten eine E-Mail von medi-lan, sobald das Software-Update verfügbar ist.

- Klicken Sie auf Einstellungen

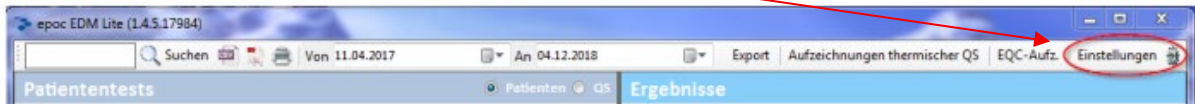


- Klicken Sie auf epoc-Host aktuell.

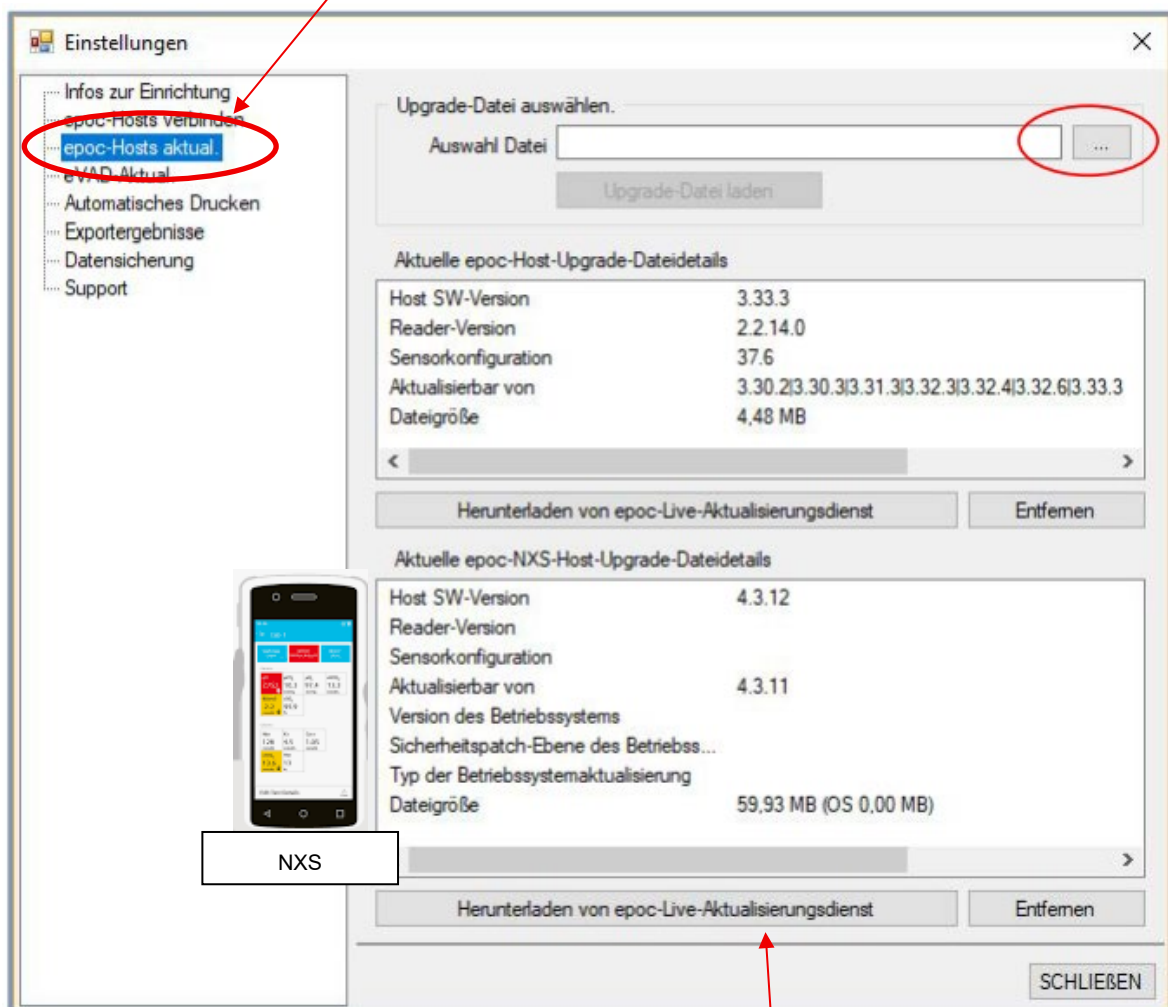

- Klicken Sie auf **Herunterladen von epoc-Live-Aktualisierungsdienst** im unteren Bereich

Das Meldfenster Überprüfung der Upgrade-Datei wird geöffnet und enthält die folgenden Informationen:

- epoc-Host-Softwareversion
- epoc-Reader-Softwareversion
- Sensorkonfiguration

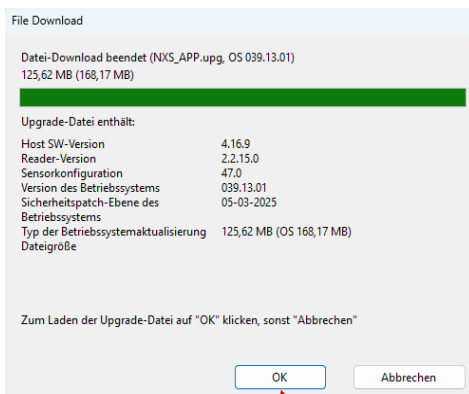


Vorgehen:

- Prüfen Sie, ob die angezeigten Softwareversionen korrekt sind
- Klicken Sie auf „OK“, um die Datei zu laden
- Oder auf „Abbrechen“, um den Vorgang zu beenden

1.2 eVAD aktualisieren:

Aktualisieren der Kontrollzielwerte

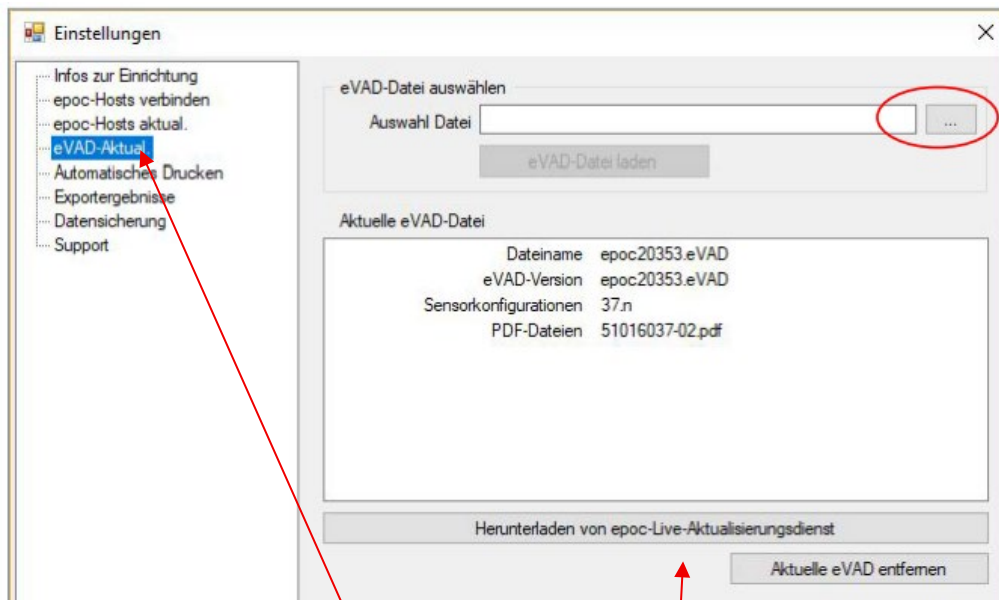


Sie befinden sich bereits im Menü „Einstellungen“ (wie im vorherigen Schritt beim Host-Update).

- Klicken Sie auf „eVAD aktual.“ (unterhalb von „epoc-Host aktual.“)
- Klicken Sie im oberen Bereich auf „Herunterladen von epoc-Live-Aktualisierungsdienst“
- eVAD-Datei prüfen und laden

Nach dem Herunterladen der eVAD-Datei öffnet sich ein Fenster zur Überprüfung.

Folgende Informationen werden angezeigt:

- eVAD-Dateiname
- eVAD-Version
- Sensorkonfigurationen
- PDF-Dateien

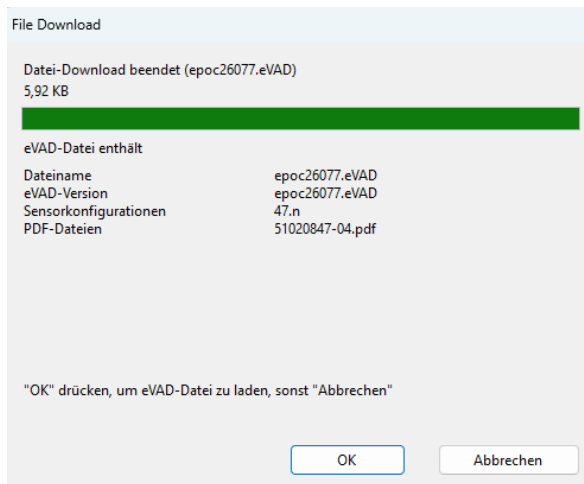

Vorgehen:

- Prüfen Sie, ob die angezeigte eVAD-Version korrekt ist
- Klicken Sie auf „**OK**“, um die Datei zu laden
- Oder auf „**Abbrechen**“, um den Vorgang zu beenden

Das Meldfenster Überprüfung der Upgrade-Datei wird geöffnet und enthält die folgenden Informationen:

- epoc-Host-Softwareversion
- epoc-Reader-Softwareversion
- Sensorkonfiguration

2.0 Update ohne Internetverbindung

Wenn kein direkter Internetzugriff vorhanden ist:

- medi-lan sendet eine E-Mail mit einem Link zur Landingpage.
- Auf der Landingpage stehen die benötigten Updatedateien zum Download bereit.

Dateien herunterladen

Es müssen **zwei Dateien** heruntergeladen werden:

- **Software-Update (.upg)**
Beispiel: *epocNXS.4.16.9a.os.039.13.01.upg*
(Version kann variieren)
- **eVAD-Datei (Referenzwerte neuer Chargen)**
Beispiel: *epoc25258.eVAD*
(Version kann variieren)


Dateien speichern

- Beide Dateien auf den **Desktop des PCs speichern oder USB-Stick**, auf dem sich **EDM Lite** befindet

2.1 Software-Update epoc:

Upload durchführen

- Die **drei Punkte (Menü)** anwählen

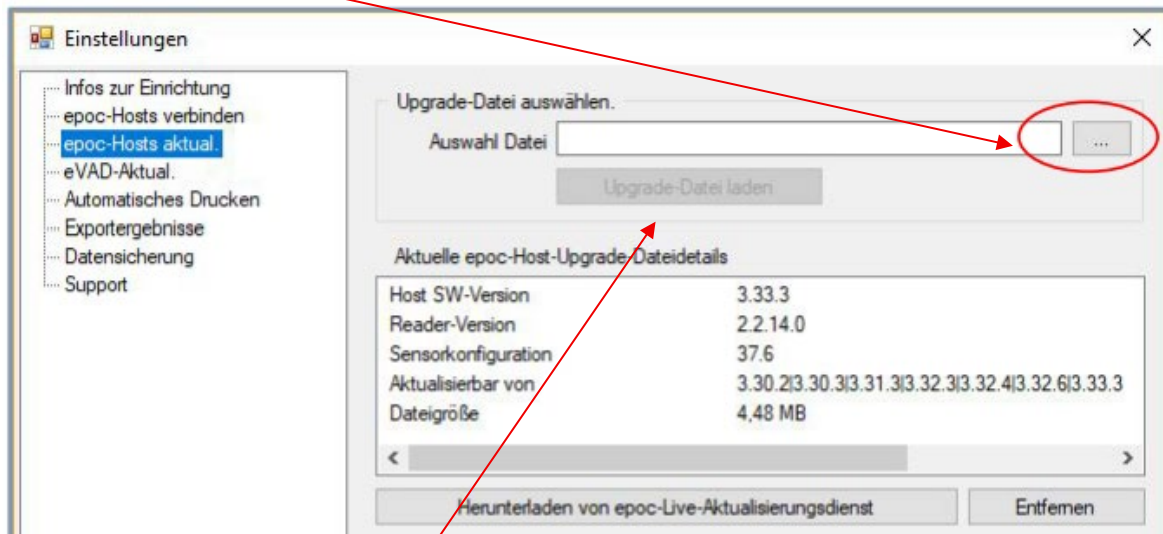


Es öffnet sich ein Fenster zur Dateiauswahl

- Wählen Sie den Speicherort aus (Desktop oder USB-Stick)
- Wählen Sie die entsprechende Update-Datei (.upg) aus
- Klicken Sie auf „Öffnen“, um die Datei zu übernehmen
- **Upgrade-Datei laden** wird aktiv und kann angewählt werden

2.2 eVAD aktualisieren:

Aktualisieren der Kontrollzielwerte

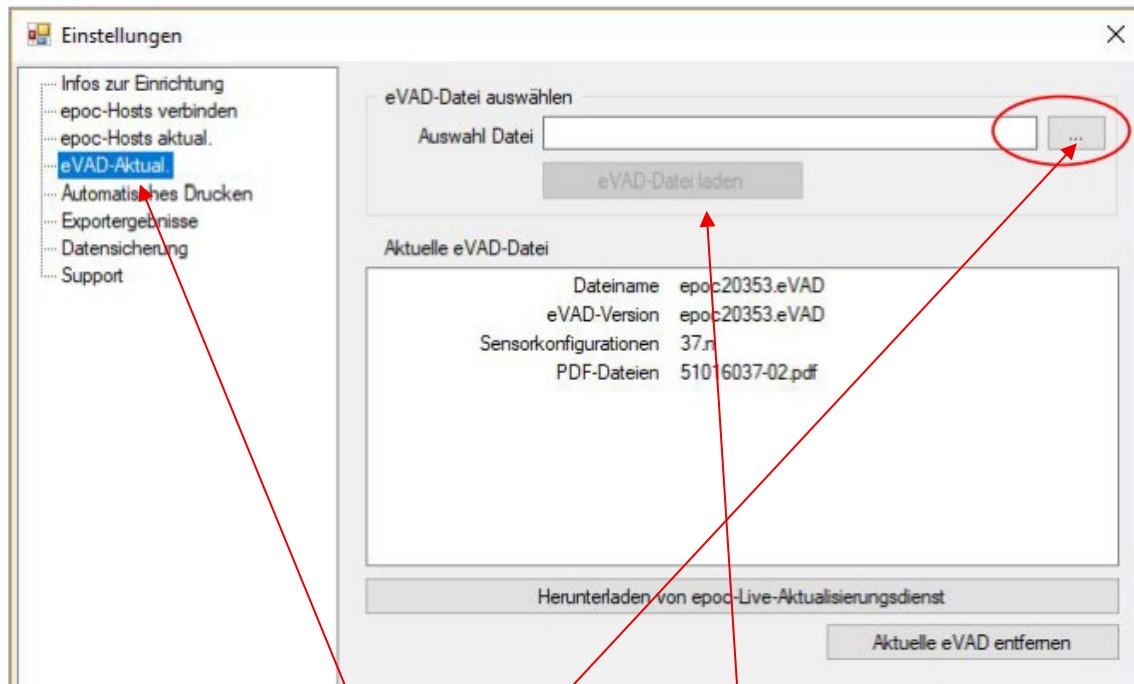

Sie befinden sich bereits im Menü „Einstellungen“ (wie im vorherigen Schritt beim Host-Update)

- Klicken Sie auf **eVAD-Aktual.**
- Klicken Sie auf die **drei Punkte**

Es öffnet sich ein Fenster zur Dateiauswahl:


- Wählen Sie den Speicherort aus (**Desktop oder USB-Stick**)
- Wählen Sie die entsprechende **eVAD-Datei (.eVAD)** aus
- Klicken Sie auf „**Öffnen**“, um die Datei zu übernehmen
- „**eVAD-Datei laden**“ wird nun aktiv und kann angewählt werden

eVAD-Datei prüfen und laden

Nach dem Herunterladen der eVAD-Datei öffnet sich ein Fenster zur Überprüfung.

Folgende Informationen werden angezeigt:

- eVAD-Dateiname
- eVAD-Version
- Sensorkonfigurationen
- PDF-Dateien

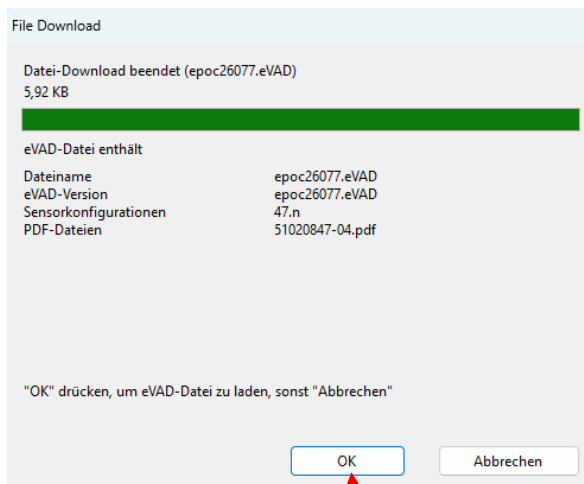

Vorgehen:

- Prüfen Sie, ob die angezeigte eVAD-Version korrekt ist
- Klicken Sie auf „**OK**“, um die Datei zu laden
- Oder auf „**Abbrechen**“, um den Vorgang zu beenden

3.0 epoc-Host und Reader aktualisieren

Nachdem Schritt 1 und 2 abgeschlossen sind, führen Sie das Update am Gerät durch.

3.1 epoc-Host aktualisieren

- Melden Sie sich als **Administrator** an



- Gehen Sie zu Einstellungen → epoc-Host aktualisieren → Vom Data Manager
- Das Update wird automatisch heruntergeladen
- Das Gerät führt einen automatischen Neustart durch
- Anschliessend erscheint eine Meldung, dass das Software-Update erfolgreich durchgeführt wurde

3.2 epoc-Reader aktualisieren

- Sie sind bereits als **Administrator angemeldet**
- Gehen Sie zurück zu **Einstellungen**
- Öffnen Sie die **Reader-Einstellungen**
- Klicken Sie auf „**Aktualisieren**“

Es erscheint die **Suche nach Readern**

- Wählen Sie den gewünschten **Reader** aus
- Verbinden Sie sich mit dem Reader
- Klicken Sie auf „**Update starten**“

Nach Abschluss erscheint eine Meldung, dass der **Reader auf dem neuesten Stand ist**

Abschluss

Das Software-Update (Host und Reader) ist nun vollständig abgeschlossen.