

Mise à jour du logiciel epocNXS via Wi-Fi / Hotspot

1) Mise à jour de l'epoc-Reader

- Connectez-vous en tant qu'administrateur (identifiant et mot de passe : administrator)



epoc NXS

- Allez dans Paramètres → Paramètres Wi-Fi, puis activez le Wi-Fi.

Établissez la connexion:

- Soit au réseau Wi-Fi interne (si vous n'êtes pas encore connecté)
- Ou, si le signal est faible, via un partage de connexion personnel (téléphone portable)
- Retournez dans les Paramètres
- Ouvrez la gestion des données et désactivez-la si elle est activée.
- Retournez dans les paramètres aller dans mettre à jour **EPOC Host** (deuxième onglet en partant du bas)
- Cliquer sur mettre à jour en ligne
- Activez « Mettre à jour eVAD
- Cliquer sur « Vérifier mises à jour »
- L'EPOC Host se connecte automatiquement aux services en ligne et effectue la mise à jour. La progression est affichée en pourcentage (1–100%)
- L'appareil redémarre automatiquement
- Un message apparaît indiquant que la mise à jour a été effectuée avec succès et à la fin, un message confirme la réussite de la mise à jour
- Reconnectez-vous en tant qu'administrateur (identifiant et mot de passe : administrator)
- Allez ensuite dans Paramètres → Gestion des données et réactivez cette option si elle était activée auparavant

2) Mettre à jour epoc Reader

- Vous êtes déjà connecté en tant qu'administrateur
- Retournez dans les paramètres et ouvrez les paramètres du Reader
- Cliquez sur « Mettre à jour »
- La recherche de reader s'affiche
- Sélectionnez le lecteur souhaité
- Connectez-vous au lecteur
- Cliquez sur « Démarrer la mise à jour »
- Une fois terminé, un message indique que le lecteur est à jour

Mise à jour entièrement terminée