


Mise à jour du logiciel epoc Motorola / Host2 via EDM-Lite

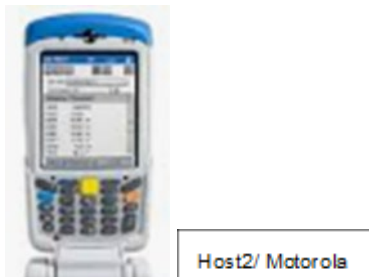


1. Mise à jour avec connexion Internet


1.1 Mise à jour du logiciel epoc :

Vous recevrez un courriel de medi-lan dès que la mise à jour logicielle est disponible

- Cliquez sur Paramètres

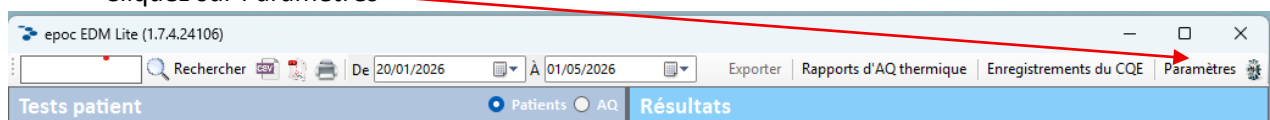


- Cliquer sur mettre à jour epoc Hosts

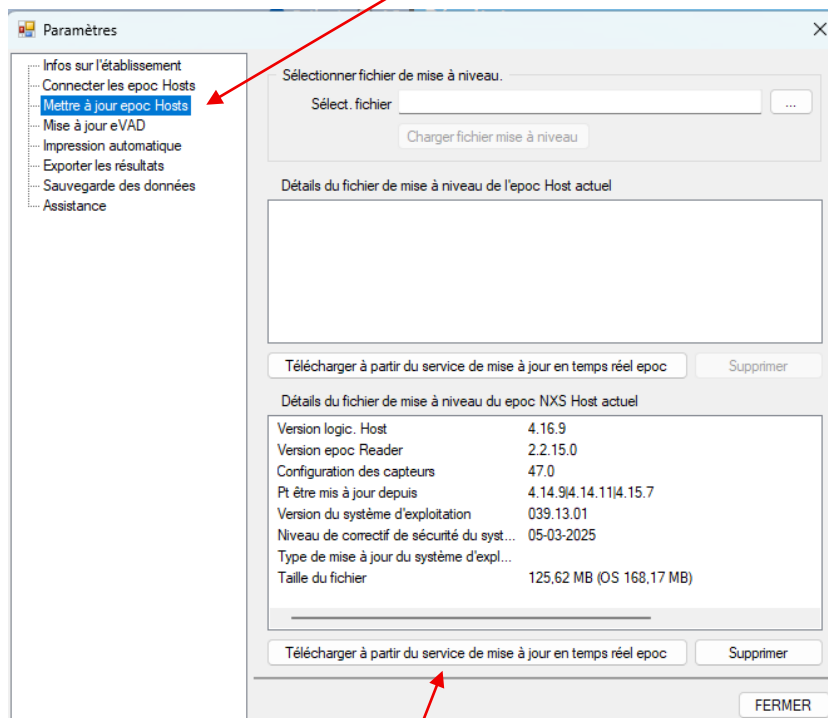

- Cliquer sur « Télécharger à partir du service de mise à jour en temps réel epoc »

La fenêtre de notification « Vérification du fichier de mise à jour » s'ouvre et contient les informations suivantes :

- Version du logiciel host epoc
- Version du logiciel du lecteur epoc
- Configuration des capteurs

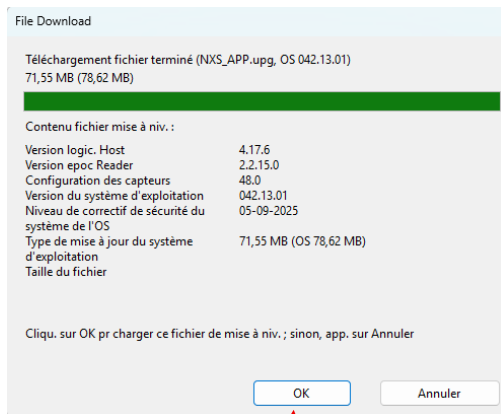


Procédure :

- Vérifier que les versions logicielles affichées sont correctes
- Cliquer sur « **OK** » pour charger le fichier
- Ou cliquer sur « Annuler » pour arrêter la procédure

1.2 Mise à jour de l'eVAD :

Mise à jour des valeurs cibles de contrôle.

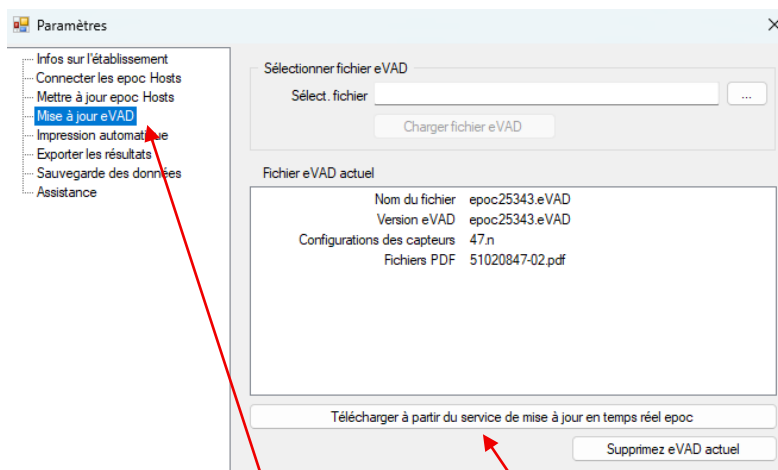


Vous êtes déjà dans le menu « Paramètres » (comme à l'étape précédente lors de la mise à jour de l'hôte).

- Cliquer sur « **Mise à jour eVAD** »
- Puis cliquer sur « **Télécharger à partir du service de mise à jour en temps réel epoc** » **Vérifier et charger le fichier eVAD**


Après le téléchargement du fichier eVAD, une fenêtre de vérification s'ouvre.
Les informations suivantes sont affichées :

- Nom du fichier eVAD
- Version de l'eVAD
- Configurations des capteurs
- Fichiers PDF

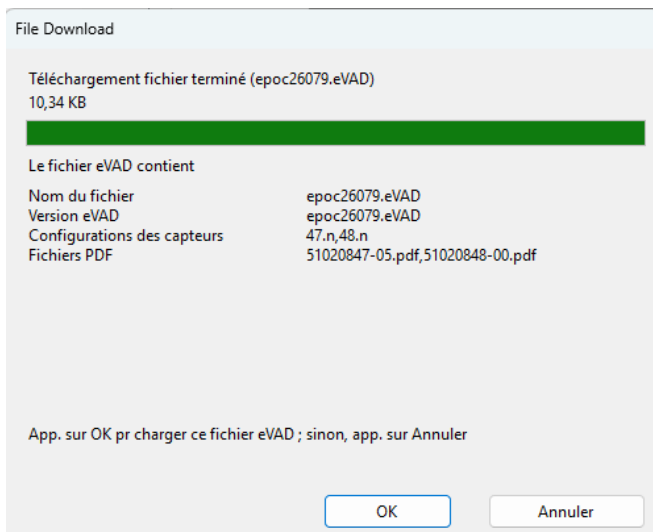

Procédure :

- Contrôler que la version eVAD affichée est correcte
- Valider avec « OK » pour charger le fichier
- Ou sélectionner « Annuler » pour interrompre l'opération

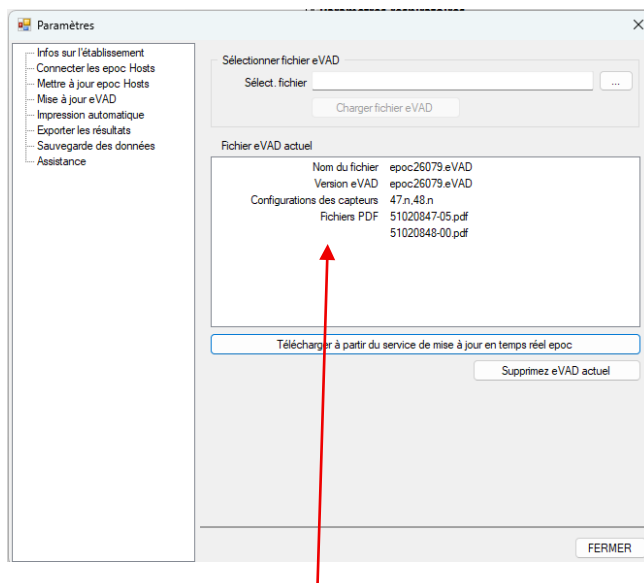

Si toutes les données sont correctes, fermer la fenêtre.

2.0 Mise à jour sans connexion Internet

En l'absence d'accès direct à Internet :

- medi-lan envoie un courriel contenant un lien vers la page de téléchargement.
- Les fichiers de mise à jour nécessaires sont disponibles au téléchargement sur cette page.

Télécharger les fichiers

Deux fichiers doivent être téléchargés :

- **Fichier de mise à jour du logiciel (.upg)**
Exemple : epoc.3.43.2a.upg
(la version peut varier)
- **Fichier eVAD (valeurs de référence des nouveaux lots)**
Exemple : epoc25258.eVAD
(la version peut varier)


Enregistrer les fichiers :

- Enregistrer les deux fichiers sur le bureau du PC ou sur une clé USB contenant EDM Lite.


2.1 Mise à jour du logiciel epoc :

Effectuer le transfert du fichier (upload)

Cliquez sur Paramètres

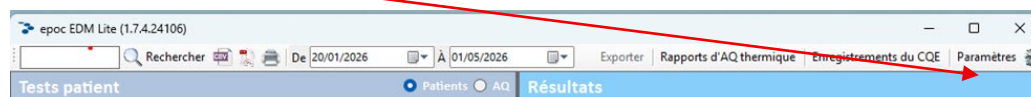

Cliquer sur le menu à trois points

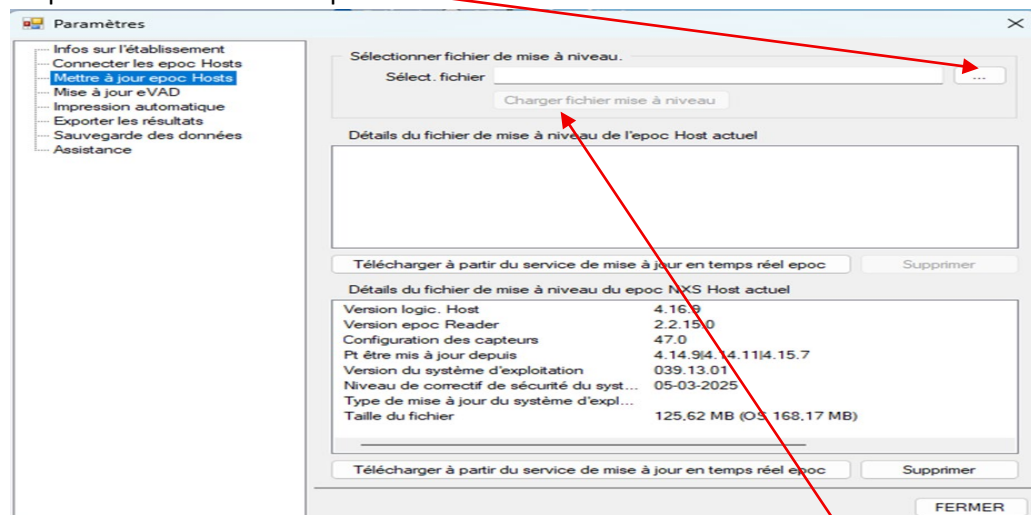


Une fenêtre de sélection de fichier s'ouvre :

- Sélectionner l'emplacement du fichier (bureau ou clé USB)
- Sélectionner le fichier de mise à jour (.upg) correspondant
- Cliquer sur « Ouvrir » pour valider le fichier
- L'option « **Charger le fichier mise à niveau** » devient active et peut être sélectionnée

2.2 Mise à jour de l'eVAD

Mise à jour des valeurs cibles de contrôle.

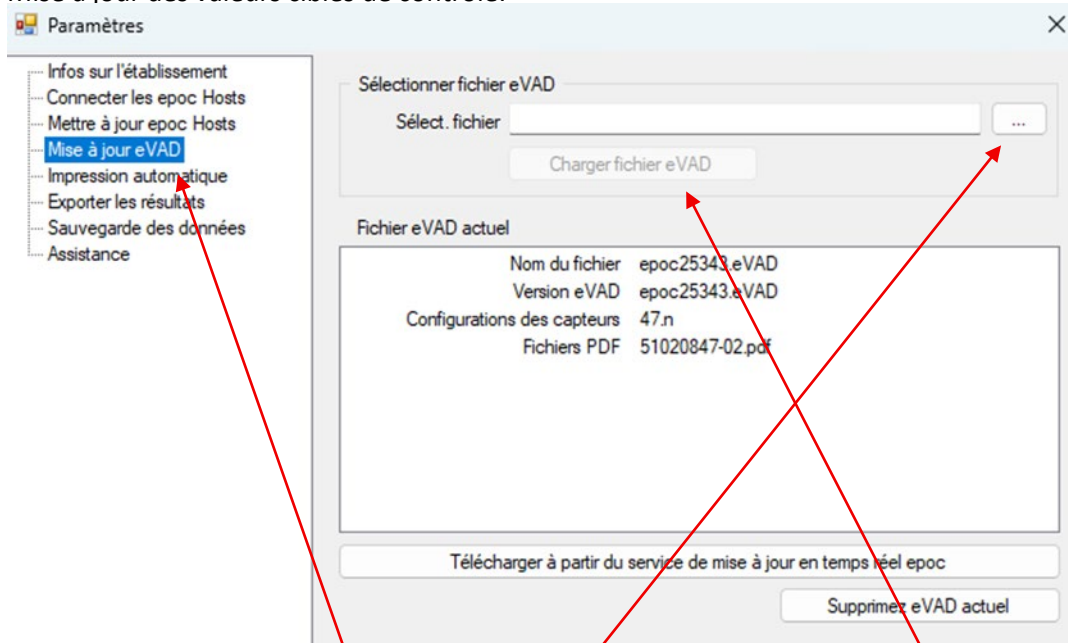

Vous êtes déjà dans le menu « Paramètres » (comme à l'étape précédente lors de la mise à jour de l'hôte).

- Cliquer sur « Mise à jour eVAD »
- Cliquer sur le menu à trois points


Une fenêtre de sélection de fichier s'ouvre :

- Sélectionner l'emplacement du fichier (bureau ou clé USB)
 - Sélectionner le fichier eVAD correspondant (.eVAD)
 - Cliquer sur « Ouvrir » pour valider le fichier
 - L'option « **Charger le fichier eVAD** » devient active et peut être sélectionnée
- Vérifier et charger le fichier eVAD

Après le téléchargement du fichier eVAD, une fenêtre de vérification s'ouvre.

Les informations suivantes sont affichées :

- Nom du fichier eVAD
- Version de l'eVAD
- Configurations des capteurs
- Fichiers PDF

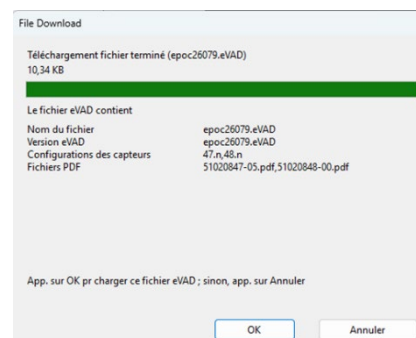

Procédure :

- Contrôler que la version eVAD affichée est correcte
- Valider avec « OK » pour charger le fichier
- Ou sélectionner « Annuler » pour interrompre l'opération

3.0 Mise à jour de l'host epoc et du lecteur

Une fois les étapes 1 et 2 terminées, effectuer la mise à jour sur l'appareil.


3.1 Mise à jour de l'host epoc

- Connectez-vous en tant qu'administrateur (identifiant et mot de passe : administrator)



administrator


- Aller dans Outils → Exécuter la mise à niveau → À partir de DM.

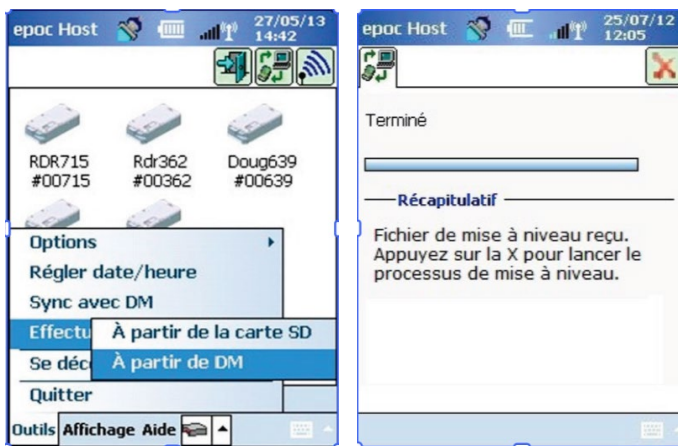

L'host epoc reçoit le fichier de mise à niveau depuis le logiciel EDM Lite

Une fois la mise à jour reçue, appuyez sur la « X » rouge pour lancer le processus de mise à niveau.

3.2 Mise à niveau logicielle du lecteur (reader)

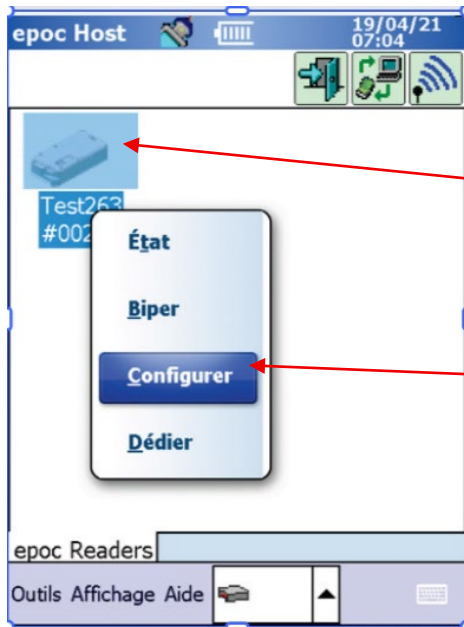

Appuyez de manière prolongée sur un Reader découvert jusqu'à ce que le menu Options du Reader sélectionné s'affiche.

Appuyez sur Configurer dans le menu. L'écran de configuration du Reader sélectionné s'affiche.



Appuyez sur le bouton Mettre à niveau.

La mise à niveau est exécutée automatiquement en deux (2) étapes :

1. Téléchargement
2. Mise à niveau.

L'opération entière prend environ quatre (4) minutes.

N'interrompez jamais le processus de mise à niveau du Reader. N'éteignez pas le Reader ou l'Host pendant la mise à niveau.