

Mise à jour du logiciel epocNXS via EDM-Lite




1. Mise à jour avec connexion Internet


1.1 Mise à jour du logiciel epoc :

Vous recevrez un courriel de medi-lan dès que la mise à jour logicielle est disponible

- Cliquez sur Paramètres

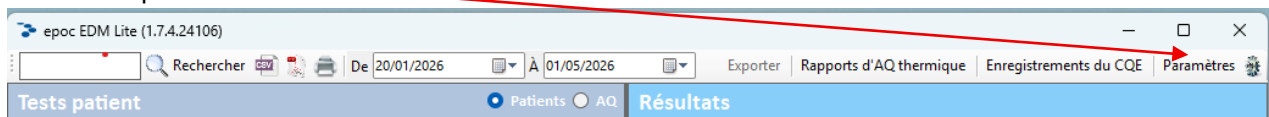


- Cliquer sur mettre à jour epoc Hosts

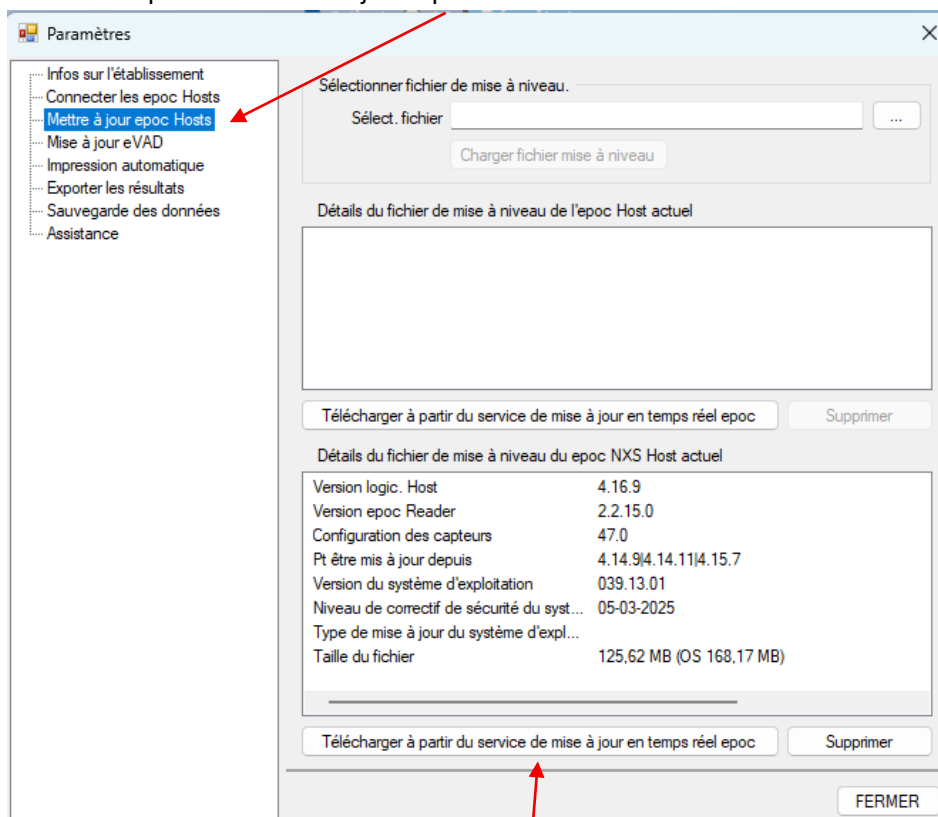

- Cliquer sur « Télécharger à partir du service de mise à jour en temps réel epoc »

La fenêtre de notification « Vérification du fichier de mise à jour » s'ouvre et contient les informations suivantes :

- Version du logiciel host epoc
- Version du logiciel du lecteur epoc
- Configuration des capteurs

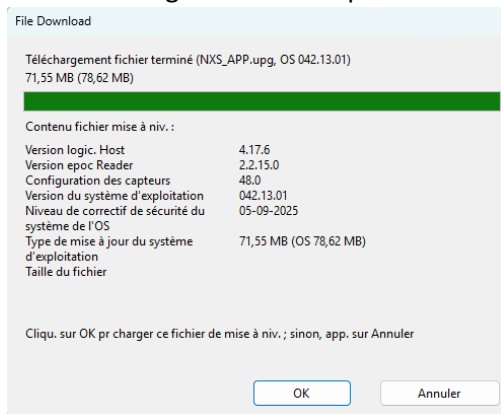


Procédure :

- Vérifier que les versions logicielles affichées sont correctes
- Cliquer sur « **OK** » pour charger le fichier
- Ou cliquer sur « Annuler » pour arrêter la procédure

1.2 Mise à jour de l'eVAD :

Mise à jour des valeurs cibles de contrôle.

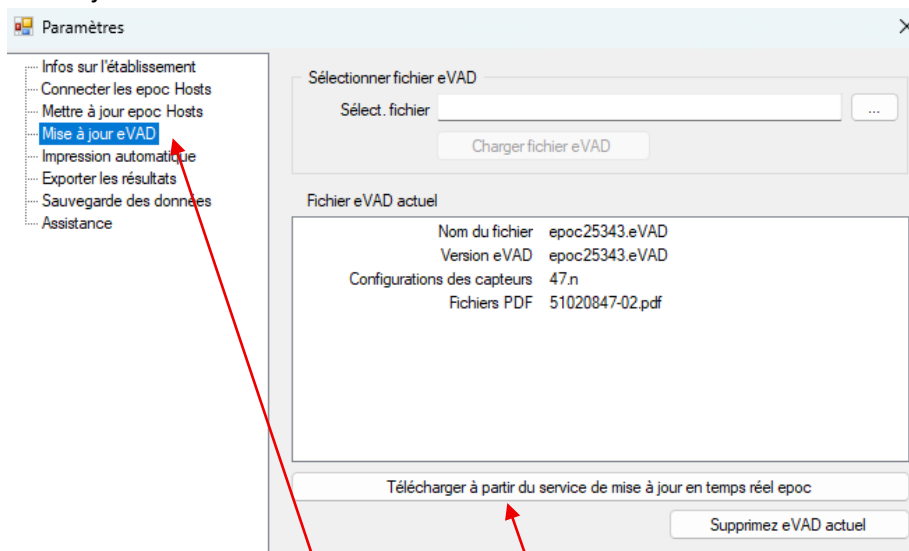


Vous êtes déjà dans le menu « Paramètres » (comme à l'étape précédente lors de la mise à jour de l'hôte).

- Cliquer sur « **Mise à jour eVAD** »
- Puis cliquer sur « **Télécharger à partir du service de mise à jour en temps réel epoc** » **Vérifier et charger le fichier eVAD**


Après le téléchargement du fichier eVAD, une fenêtre de vérification s'ouvre.
Les informations suivantes sont affichées :

- Nom du fichier eVAD
- Version de l'eVAD
- Configurations des capteurs
- Fichiers PDF

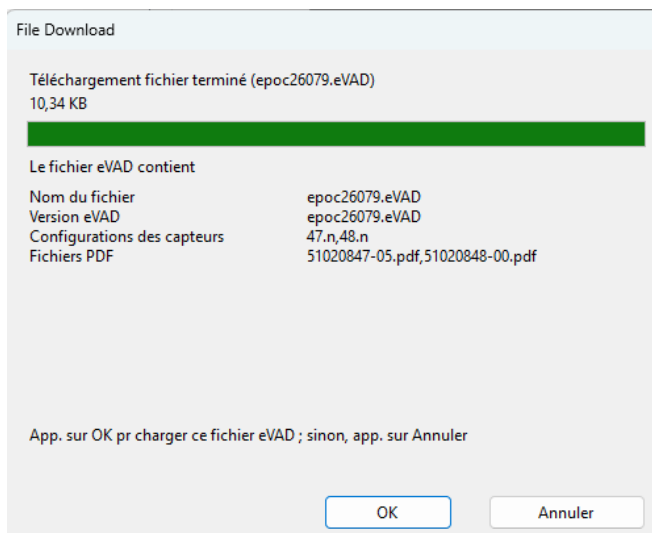

Procédure :

- Contrôler que la version eVAD affichée est correcte
- Valider avec « **OK** » pour charger le fichier
- Ou sélectionner « Annuler » pour interrompre l'opération

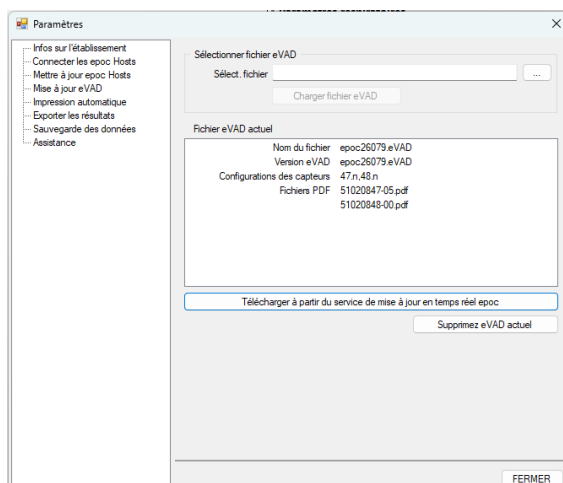

Si toutes les données sont correctes, fermer la fenêtre.

2.0 Mise à jour sans connexion Internet

En l'absence d'accès direct à Internet :

- medi-lan envoie un courriel contenant un lien vers la page de téléchargement.
- Les fichiers de mise à jour nécessaires sont disponibles au téléchargement sur cette page.

Télécharger les fichiers

Deux fichiers doivent être téléchargés :

- **Fichier de mise à jour du logiciel (.upg)**
Exemple : epocNXS.4.16.9a.os.039.13.01.upg
(la version peut varier)
- **Fichier eVAD (valeurs de référence des nouveaux lots)**
Exemple : epoc25258.eVAD
(la version peut varier)


Enregistrer les fichiers :

- Enregistrer les deux fichiers sur le bureau du PC ou sur une clé USB contenant EDM Lite.


2.1 Mise à jour du logiciel epoc :

Effectuer le transfert du fichier (upload)

Cliquez sur Paramètres

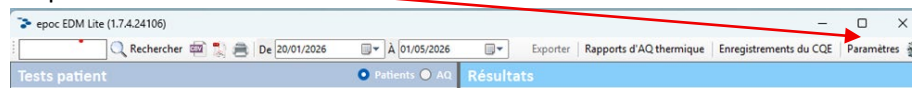

Cliquer sur le menu à trois points

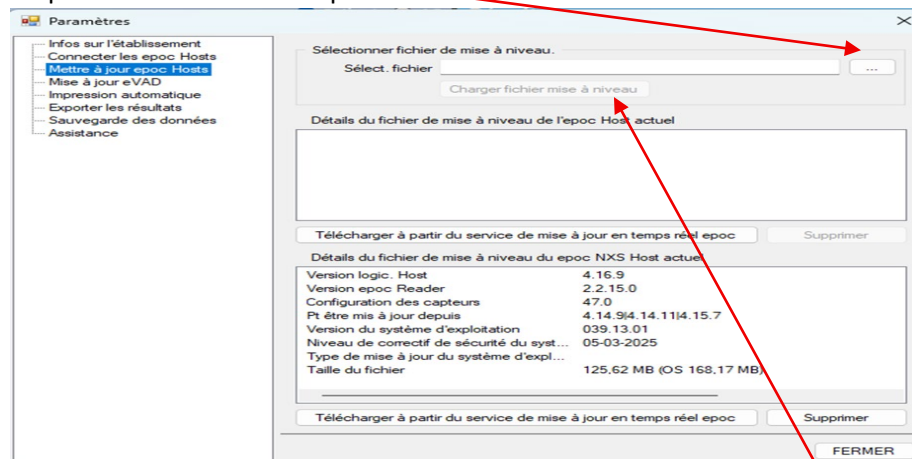


Une fenêtre de sélection de fichier s'ouvre :

- Sélectionner l'emplacement du fichier (bureau ou clé USB)
- Sélectionner le fichier de mise à jour (.upg) correspondant
- Cliquer sur « Ouvrir » pour valider le fichier
- L'option « **Charger le fichier mise à niveau** » devient active et peut être sélectionnée

2.2 Mise à jour de l'eVAD

Mise à jour des valeurs cibles de contrôle.

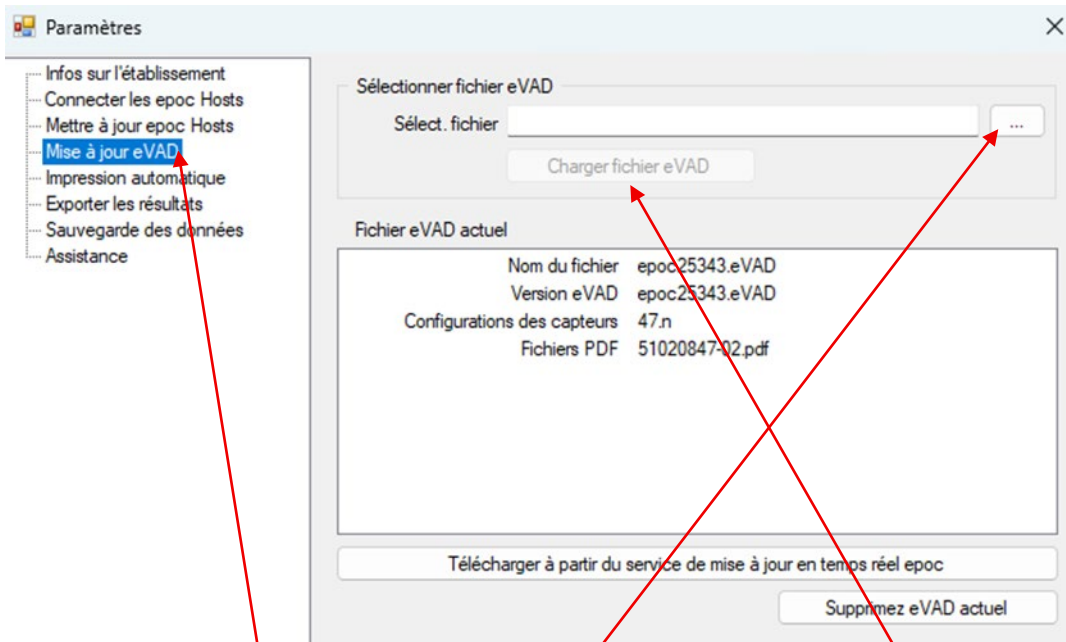

Vous êtes déjà dans le menu « Paramètres » (comme à l'étape précédente lors de la mise à jour de l'hôte).

- Cliquer sur « Mise à jour eVAD »
- Cliquer sur le menu à trois points


Une fenêtre de sélection de fichier s'ouvre :

- Sélectionner l'emplacement du fichier (bureau ou clé USB)
 - Sélectionner le fichier eVAD correspondant (.eVAD)
 - Cliquer sur « Ouvrir » pour valider le fichier
 - L'option « **Charger le fichier eVAD** » devient active et peut être sélectionnée
- Vérifier et charger le fichier eVAD

Après le téléchargement du fichier eVAD, une fenêtre de vérification s'ouvre.

Les informations suivantes sont affichées :

- Nom du fichier eVAD
- Version de l'eVAD
- Configurations des capteurs
- Fichiers PDF

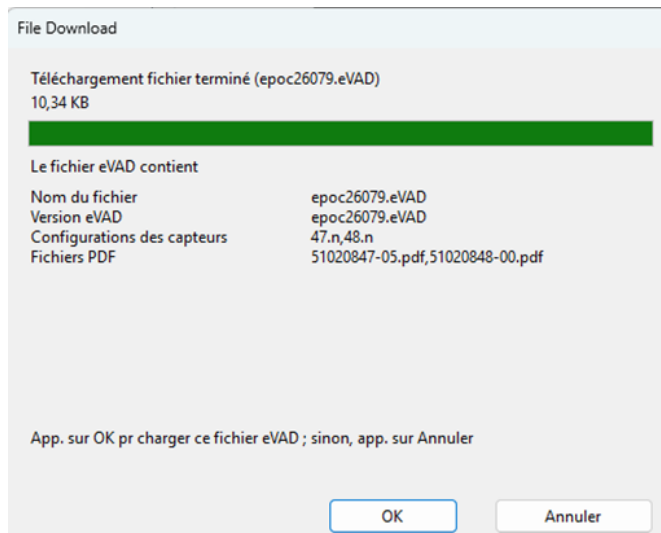

Procédure :

- Contrôler que la version eVAD affichée est correcte
- Valider avec « OK » pour charger le fichier
- Ou sélectionner « Annuler » pour interrompre l'opération

3.0 Mise à jour de l'host epoc et du lecteur

Une fois les étapes 1 et 2 terminées, effectuer la mise à jour sur l'appareil.

3.1 Mise à jour de l'host epoc

- Connectez-vous en tant qu'administrateur (identifiant et mot de passe : administrator)



- Accédez à Paramètres → Mise à jour de l'epoc Host → À partir du Data Manager
- Le téléchargement de la mise à jour s'effectue automatiquement
- L'appareil redémarre automatiquement après installation
- Un message confirme la réussite de la mise à jour logicielle

3.2 Mise à jour de l'epoc-Reader

- Vous êtes déjà connecté en tant qu'administrateur
- Revenez dans Paramètres
- Ouvrez les paramètres du Reader
- Cliquez sur « Mettre à jour »

La recherche des Readers disponibles s'affiche

- Sélectionnez le Reader souhaité
- Établissez la connexion avec le Reader
- Cliquez sur « Démarrer la mise à jour »

À la fin du processus, un message confirme que le Reader est à jour

La mise à jour logicielle (Host et Reader) est désormais entièrement terminée.