

epoc Motorola/ Host2 Software-Update über EDM-Lite

1.0 Update mit Internetverbindung


1.1 Software-Update epoc:

Sie erhalten eine E-Mail von medi-lan, sobald das Software-Update verfügbar ist.

- Klicken Sie auf Einstellungen




- Klicken Sie auf epoc-Hosts aktuell.

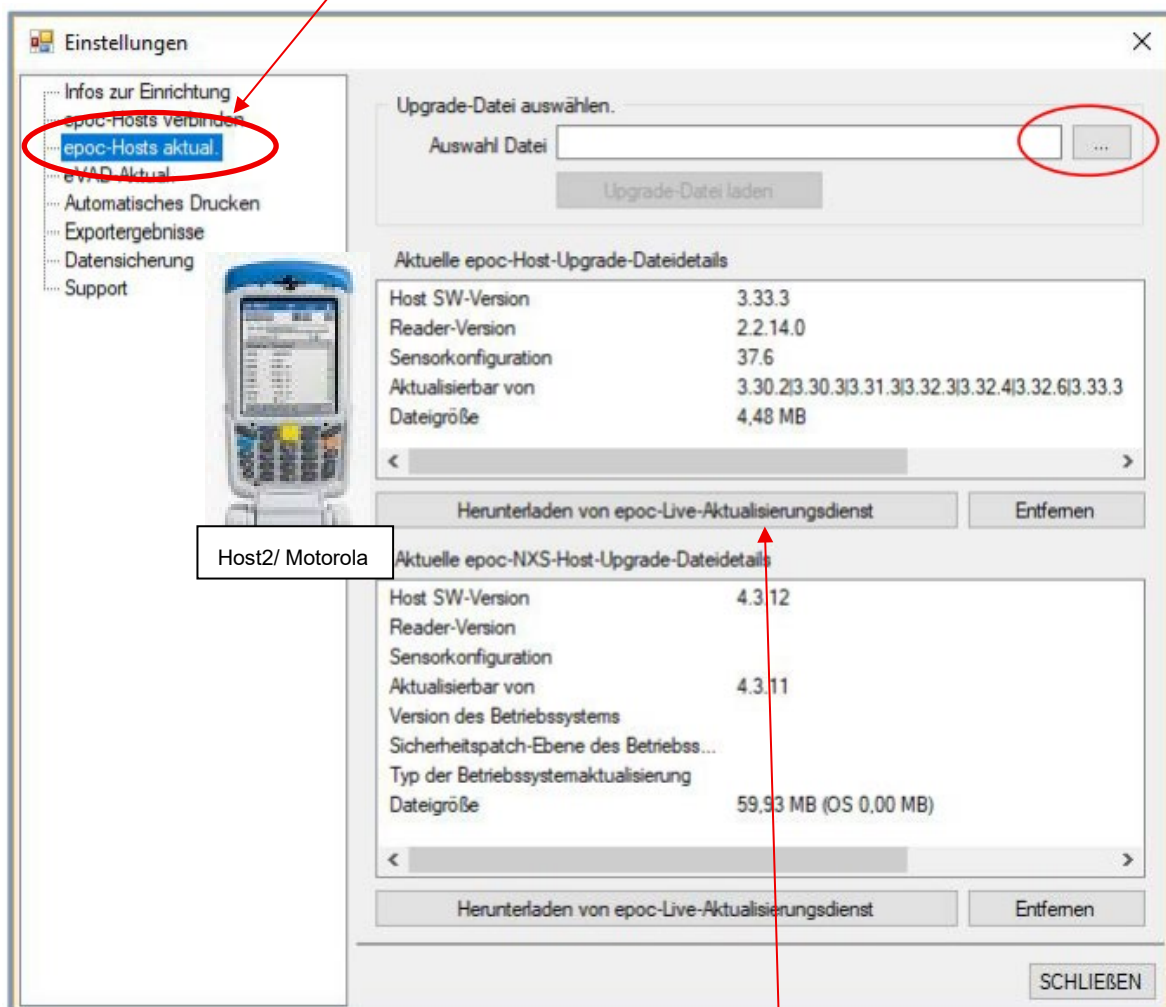

- Klicken Sie auf **Herunterladen von epoc-Live-Aktualisierungsdienst** im oberen Bereich

Das Meldfenster Überprüfung der Upgrade-Datei wird geöffnet und enthält die folgenden Informationen:

- epoc-Host-Softwareversion
- epoc-Reader-Softwareversion
- Sensorkonfiguration

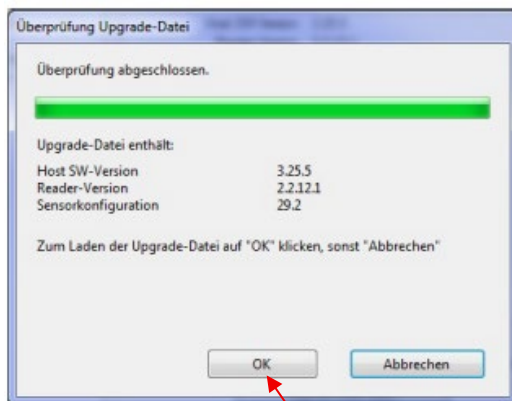


Vorgehen:

- Prüfen Sie, ob die angezeigten Softwareversionen korrekt sind
- Klicken Sie auf „**OK**“, um die Datei zu laden
- Oder auf „**Abbrechen**“, um den Vorgang zu beenden

1.2 eVAD aktualisieren:

Aktualisieren der Kontrollziehlwerte

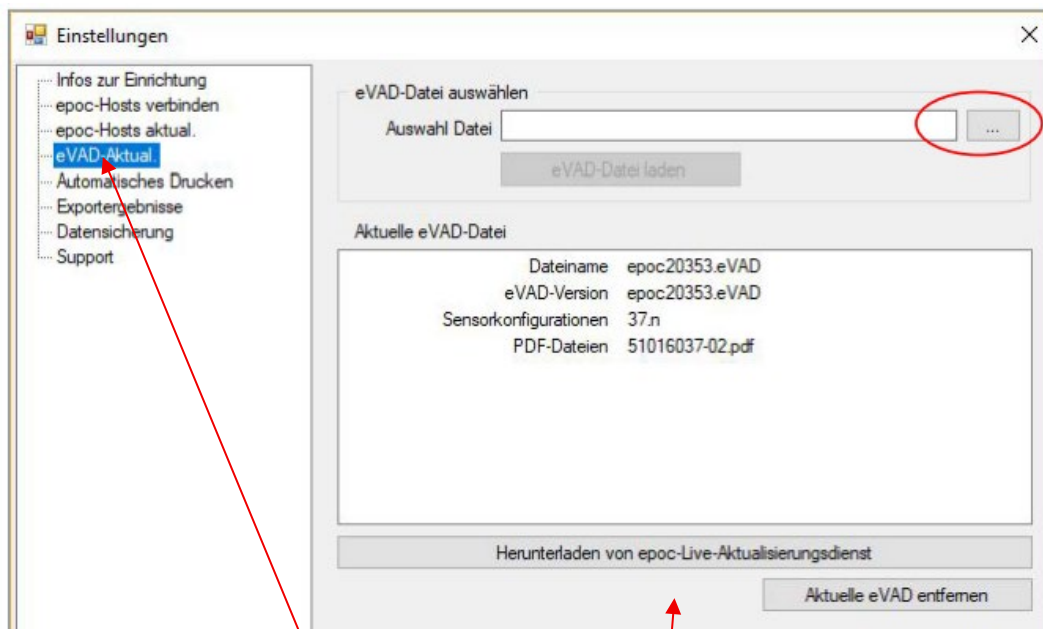

Sie befinden sich bereits im Menü „**Einstellungen**“ (wie im vorherigen Schritt beim Host-Update).


- Klicken Sie auf „**eVAD aktual.**“ (unterhalb von „epoc-Host aktual.“)
- Klicken Sie im oberen Bereich auf „**Herunterladen von epoc-Live-Aktualisierungsdienst**“

eVAD-Datei prüfen und laden

Nach dem Herunterladen der eVAD-Datei öffnet sich ein Fenster zur Überprüfung.

Folgende Informationen werden angezeigt:

- eVAD-Dateiname
- eVAD-Version
- Sensorkonfigurationen
- PDF-Dateien

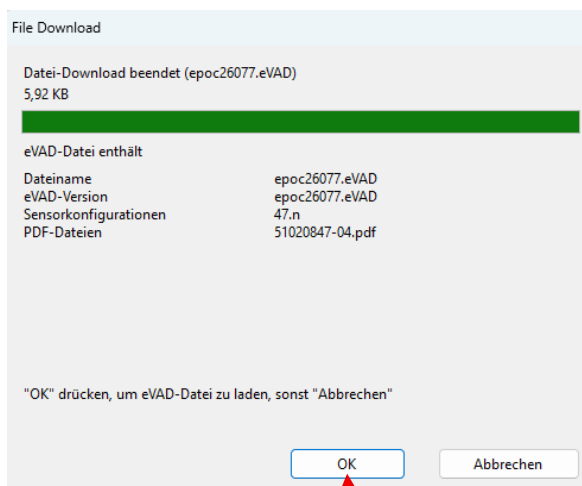


Vorgehen:

- Prüfen Sie, ob die angezeigte eVAD-Version korrekt ist
- Klicken Sie auf „**OK**“, um die Datei zu laden
- Oder auf „**Abbrechen**“, um den Vorgang zu beenden

Das Meldfenster Überprüfung der Upgrade-Datei wird geöffnet und enthält die folgenden Informationen:

- epoc-Host-Softwareversion
- epoc-Reader-Softwareversion
- Sensorkonfiguration

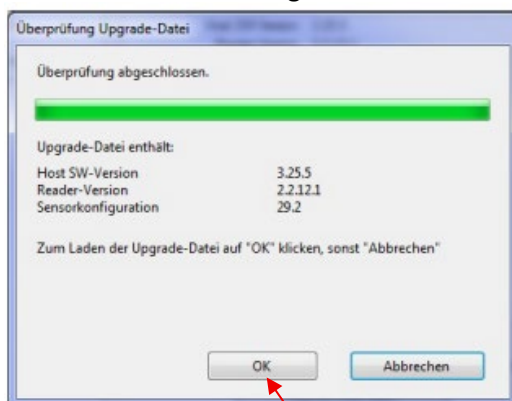

Vorgehen:

- Prüfen Sie, ob die angezeigten Softwareversionen korrekt sind
- Klicken Sie auf „**OK**“, um die Datei zu laden
- Oder auf „**Abbrechen**“, um den Vorgang zu beenden

2.0 Update ohne Internetverbindung

Wenn kein direkter Internetzugriff vorhanden ist:

- medi-lan sendet eine E-Mail mit einem Link zur Landingpage.
- Auf der Landingpage stehen die benötigten Updatedateien zum Download bereit.

Dateien herunterladen

Es müssen **zwei Dateien** heruntergeladen werden:

- **Software-Update (.upg)**
Beispiel: *epoc.3.43.2a.upg*
(Version kann variieren)
- **eVAD-Datei (Referenzwerte neuer Chargen)**
Beispiel: *epoc25258.eVAD*
(Version kann variieren)


Dateien speichern

- Beide Dateien auf den **Desktop des PCs speichern oder USB Stick**, auf dem sich **EDM Lite** befindet

2.1 Software-Update epoc:

Upload durchführen

- Die **drei Punkte (Menü)** anwählen

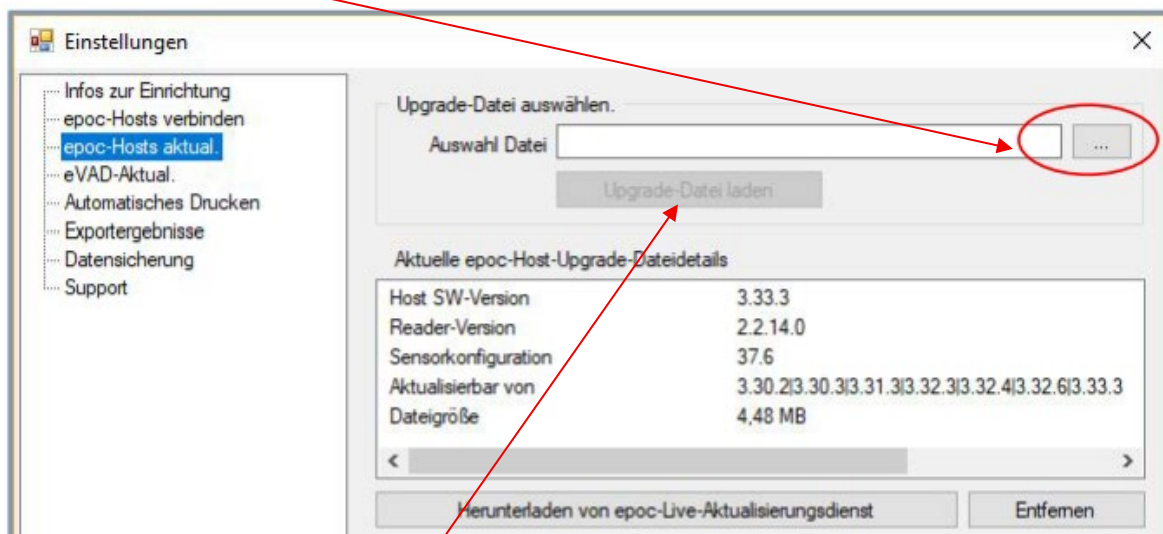


Es öffnet sich ein Fenster zur Dateiauswahl

- Wählen Sie den Speicherort aus (Desktop oder USB-Stick)
- Wählen Sie die entsprechende Update-Datei (.upg) aus
- Klicken Sie auf „Öffnen“, um die Datei zu übernehmen
- **Upgrade-Datei laden** wird aktiv und kann angewählt werden

2.2 eVAD aktualisieren:

Aktualisieren der Kontrollzielwerte

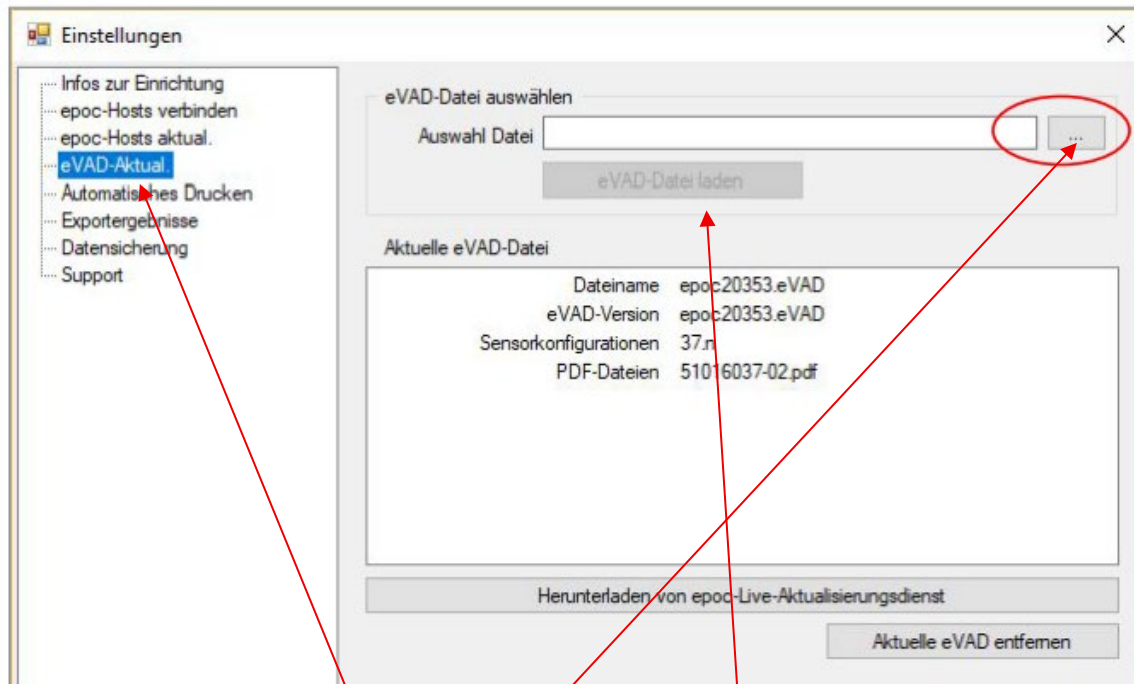

Sie befinden sich bereits im Menü „Einstellungen“ (wie im vorherigen Schritt beim Host-Update)

- Klicken Sie auf **eVAD-Aktual.**
- Klicken Sie auf die **drei Punkte**

Es öffnet sich ein Fenster zur Dateiauswahl:


- Wählen Sie den Speicherort aus (**Desktop oder USB-Stick**)
- Wählen Sie die entsprechende **eVAD-Datei (.eVAD)** aus
- Klicken Sie auf „**Öffnen**“, um die Datei zu übernehmen
- „**eVAD-Datei laden**“ wird nun aktiv und kann angewählt werden

eVAD-Datei prüfen und laden

Nach dem Herunterladen der eVAD-Datei öffnet sich ein Fenster zur Überprüfung.

Folgende Informationen werden angezeigt:

- eVAD-Dateiname
- eVAD-Version
- Sensorkonfigurationen
- PDF-Dateien

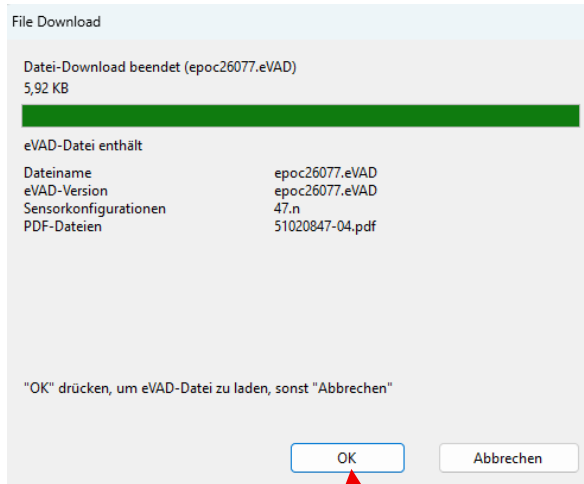

Vorgehen:

- Prüfen Sie, ob die angezeigte eVAD-Version korrekt ist
- Klicken Sie auf „**OK**“, um die Datei zu laden
- Oder auf „**Abbrechen**“, um den Vorgang zu beenden

3.0 epoc-Host und Reader aktualisieren


Nachdem Schritt 1 und 2 abgeschlossen sind, führen Sie das Update am Gerät durch.

3.1 epoc-Host aktualisieren

- Melden Sie sich als **Administrator** an



- Gehen Sie zu **Tools** → **Upgrade ausführen** → **Von DM**

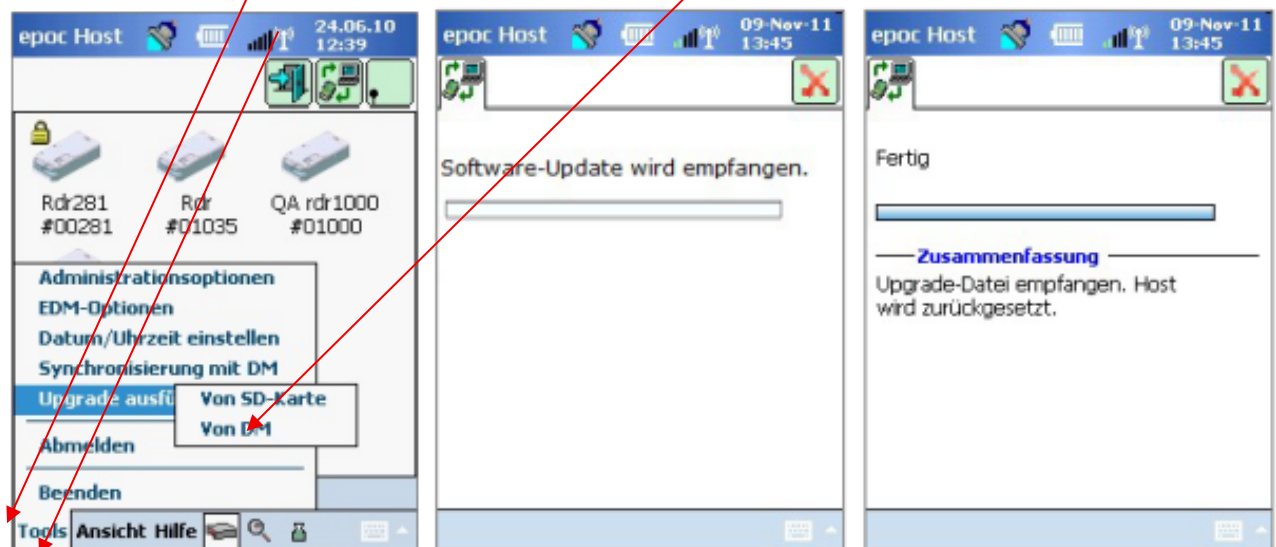


-

- Der epoc-Host erhält die Upgrade-Datei aus der **EDM Lite Software**
 - Tippen Sie auf das **Symbol oben rechts**, um das Upgrade zu starten
- Der epoc-Host wird neu gestartet und die Software automatisch aktualisiert

3.2 Reader aktualisieren



- Drücken Sie mit dem **Stift lange auf das Readersymbol**, bis das Menü angezeigt wird
- Wählen Sie **„Konfigurieren“**
Anschließend wird der Bildschirm „Konfiguration“ angezeigt.

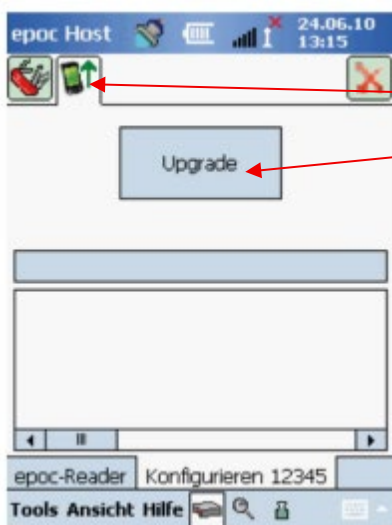

- Klicken Sie auf den Reiter für die Reader-Upgrade-Funktion (grüner Pfeil nach oben). Drücken Sie im Anschluss auf den Button **„Upgrade“**

- ☞ Das Upgrade läuft automatisch in zwei Schritten ab:
 1. Download
 2. Installation
- ☞ Dauer: ca. **4 Minuten**

Wichtiger Hinweis

- Unterbrechen Sie den Upgrade-Prozess **nicht**
- Schalten Sie weder Reader noch Host während des Updates aus