


## epocNXS Software-Update über EDM-Lite

### 1.0 Update mit Internetverbindung


#### 1.1 Software-Update epoc:

Sie erhalten eine E-Mail von medi-lan, sobald das Software-Update verfügbar ist.

- Klicken Sie auf **Einstellungen**

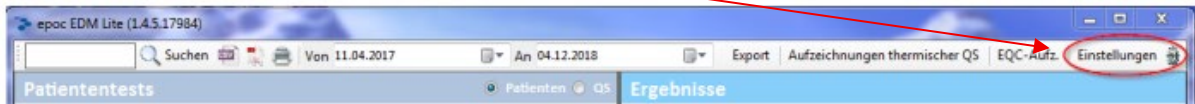


- Klicken Sie auf **epoc-Hosts aktuell**.

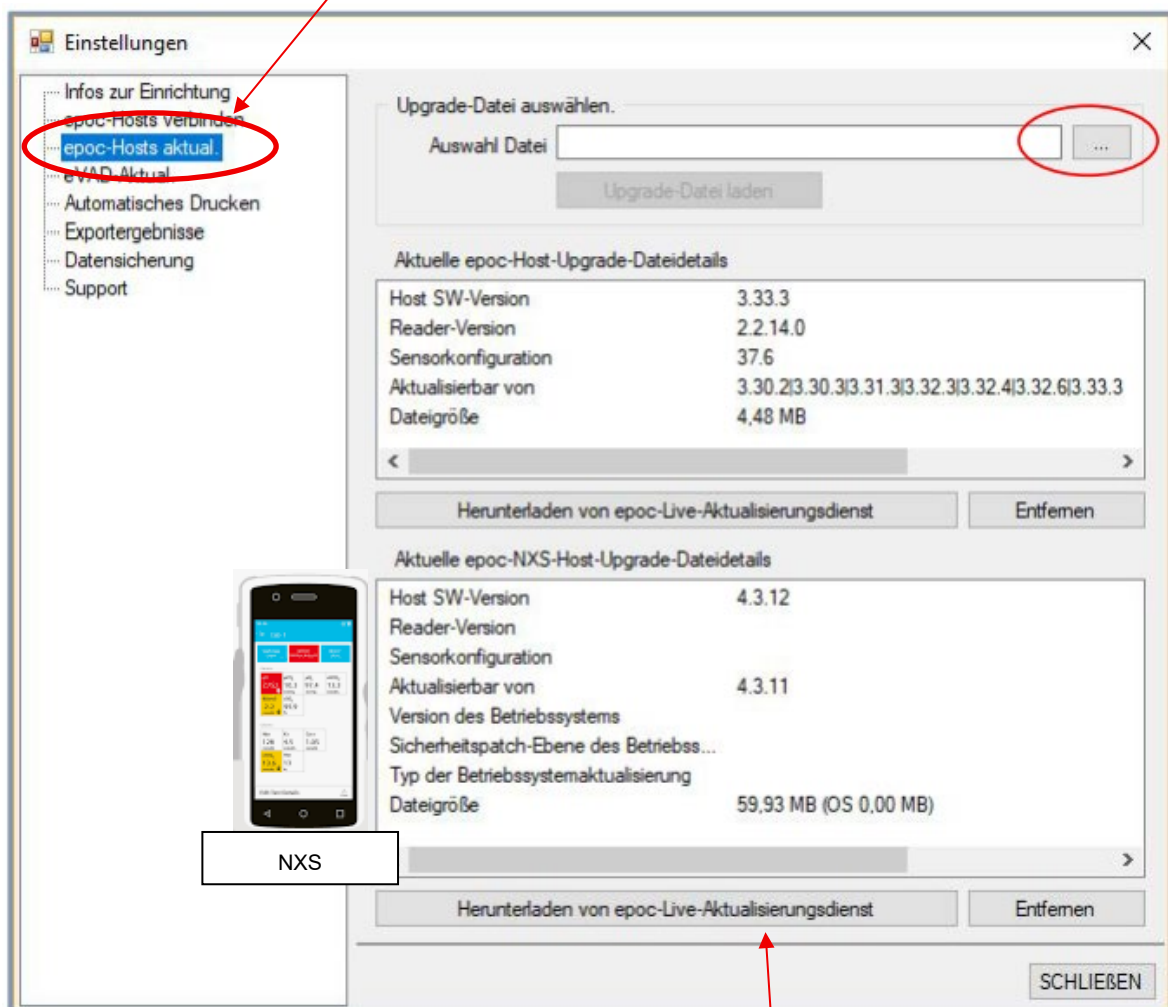

- Klicken Sie auf **Herunterladen von epoc-Live-Aktualisierungsdienst** im unteren Bereich

Das Meldfenster Überprüfung der Upgrade-Datei wird geöffnet und enthält die folgenden Informationen:

- epoc-Host-Softwareversion
- epoc-Reader-Softwareversion
- Sensorkonfiguration

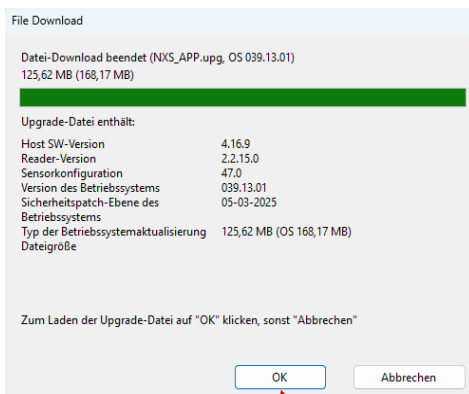


**Vorgehen:**

- Prüfen Sie, ob die angezeigten Softwareversionen korrekt sind
- Klicken Sie auf „**OK**“, um die Datei zu laden
- Oder auf „**Abbrechen**“, um den Vorgang zu beenden

## 1.2 eVAD aktualisieren:

Aktualisieren der Kontrollzielwerte

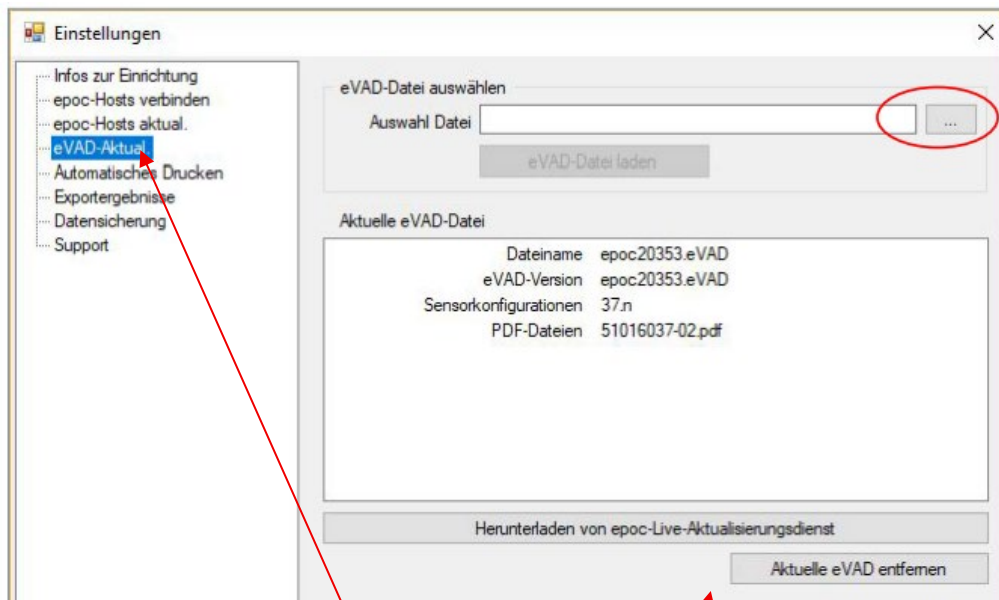


Sie befinden sich bereits im Menü „**Einstellungen**“ (wie im vorherigen Schritt beim Host-Update).

- Klicken Sie auf „**eVAD aktual.**“ (unterhalb von „epoc-Host aktual.“)
- Klicken Sie im oberen Bereich auf „**Herunterladen von epoc-Live-Aktualisierungsdienst**“
- **eVAD-Datei prüfen und laden**

Nach dem Herunterladen der eVAD-Datei öffnet sich ein Fenster zur Überprüfung.  
**Folgende Informationen werden angezeigt:**

- eVAD-Dateiname
- eVAD-Version
- Sensorkonfigurationen
- PDF-Dateien

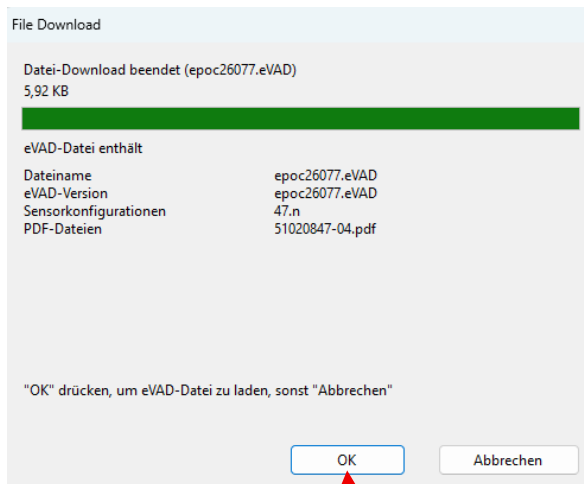


**Vorgehen:**

- Prüfen Sie, ob die angezeigte eVAD-Version korrekt ist
- Klicken Sie auf „**OK**“, um die Datei zu laden
- Oder auf „**Abbrechen**“, um den Vorgang zu beenden

Das Meldfenster Überprüfung der Upgrade-Datei wird geöffnet und enthält die folgenden Informationen:

- epoc-Host-Softwareversion
- epoc-Reader-Softwareversion
- Sensorkonfiguration

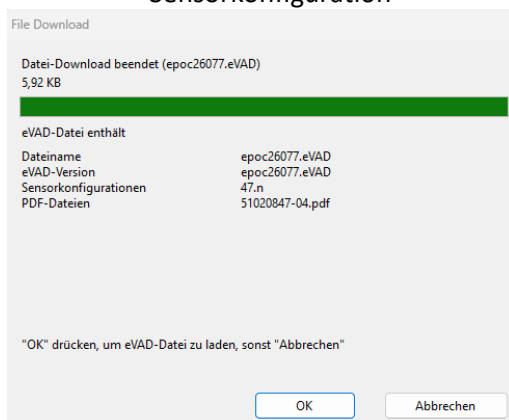

**Vorgehen:**

- Prüfen Sie, ob die angezeigten Softwareversionen korrekt sind
- Klicken Sie auf „**OK**“, um die Datei zu laden
- Oder auf „**Abbrechen**“, um den Vorgang zu beenden

## 2.0 Update ohne Internetverbindung

Wenn kein direkter Internetzugriff vorhanden ist:

- medi-lan sendet eine E-Mail mit einem Link zur Landingpage.
- Auf der Landingpage stehen die benötigten Updatedateien zum Download bereit.

### Dateien herunterladen

Es müssen **zwei Dateien** heruntergeladen werden:

- **Software-Update (.upg)**  
Beispiel: *epocNXS.4.16.9a.os.039.13.01.upg*  
(Version kann variieren)
- **eVAD-Datei (Referenzwerte neuer Chargen)**  
Beispiel: *epoc25258.eVAD*  
(Version kann variieren)


### Dateien speichern

- Beide Dateien auf den **Desktop des PCs speichern oder USB Stick**, auf dem sich **EDM Lite** befindet

## 2.1 Software-Update epoc:

### Upload durchführen

- Die **drei Punkte (Menü)** anwählen

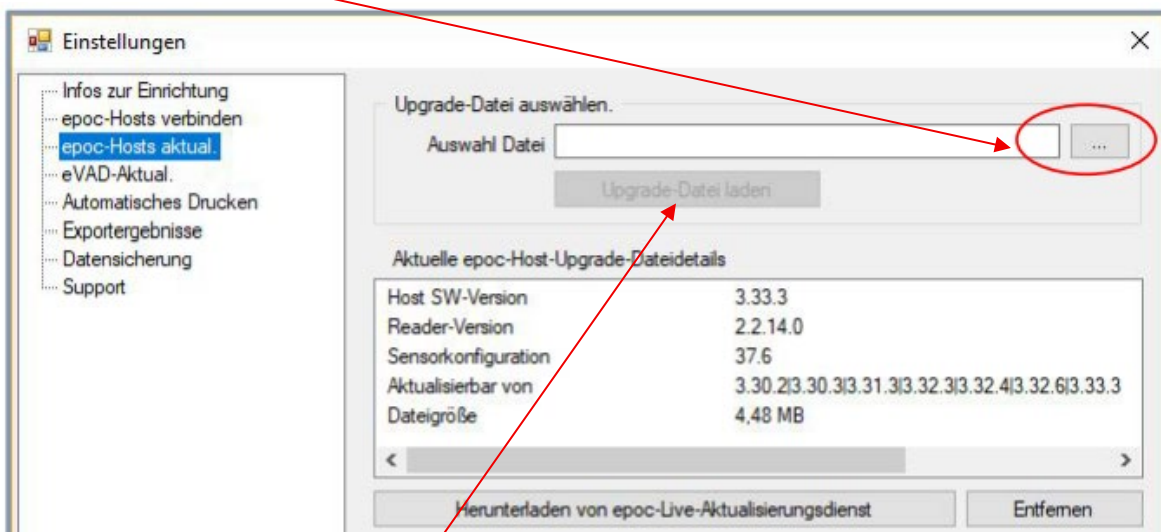


Es öffnet sich ein Fenster zur Dateiauswahl

- Wählen Sie den Speicherort aus (Desktop oder USB-Stick)
- Wählen Sie die entsprechende Update-Datei (.upg) aus
- Klicken Sie auf „Öffnen“, um die Datei zu übernehmen
- **Upgrade-Datei laden** wird aktiv und kann angewählt werden

## 2.2 eVAD aktualisieren:

Aktualisieren der Kontrollzielwerte

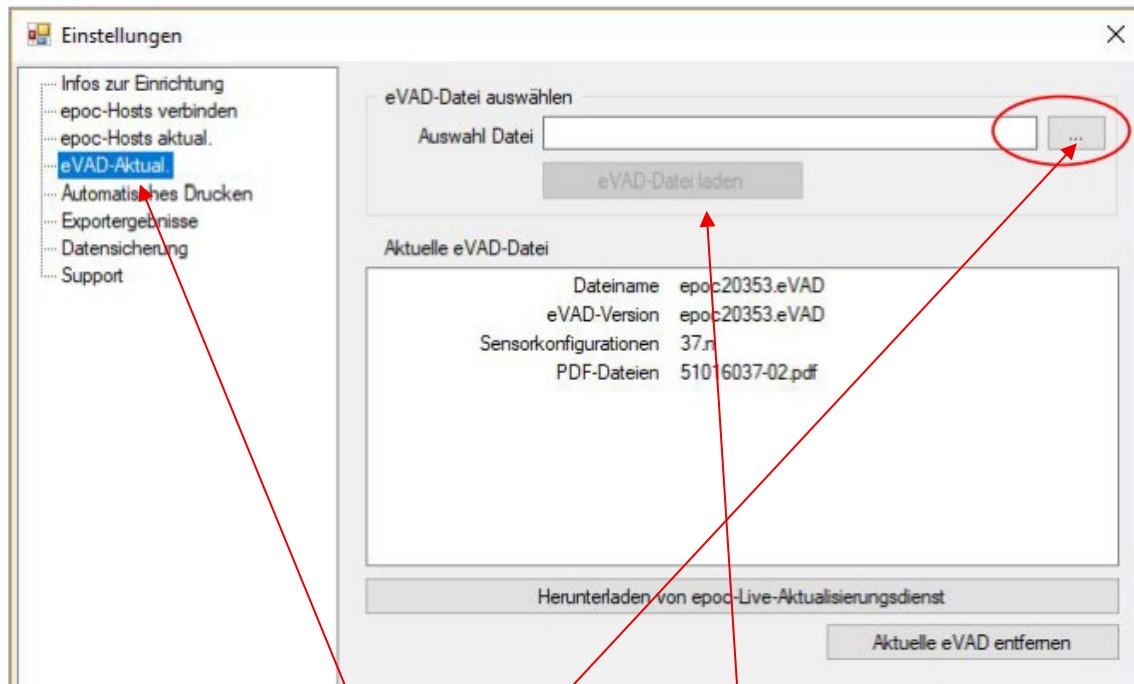

Sie befinden sich bereits im Menü „Einstellungen“ (wie im vorherigen Schritt beim Host-Update)

- Klicken Sie auf **eVAD-Aktual.**
- Klicken Sie auf die **drei Punkte**

Es öffnet sich ein Fenster zur Dateiauswahl:


- Wählen Sie den Speicherort aus (**Desktop oder USB-Stick**)
- Wählen Sie die entsprechende **eVAD-Datei (.eVAD)** aus
- Klicken Sie auf „**Öffnen**“, um die Datei zu übernehmen
- „**eVAD-Datei laden**“ wird nun aktiv und kann angewählt werden

eVAD-Datei prüfen und laden

Nach dem Herunterladen der eVAD-Datei öffnet sich ein Fenster zur Überprüfung.

Folgende Informationen werden angezeigt:

- eVAD-Dateiname
- eVAD-Version
- Sensorkonfigurationen
- PDF-Dateien

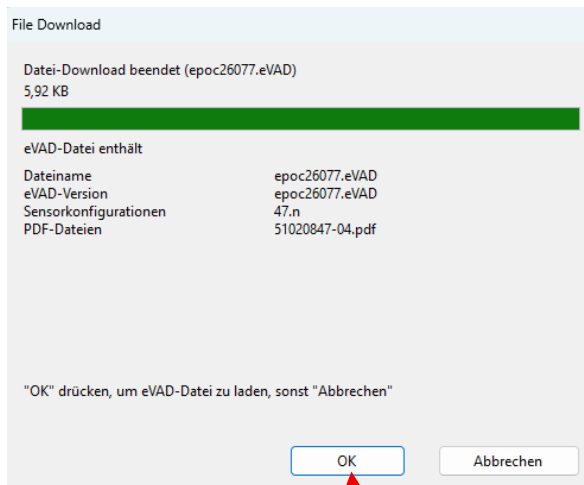

### Vorgehen:

- Prüfen Sie, ob die angezeigte eVAD-Version korrekt ist
- Klicken Sie auf „**OK**“, um die Datei zu laden
- Oder auf „**Abbrechen**“, um den Vorgang zu beenden

## 3.0 epoc-Host und Reader aktualisieren

Nachdem Schritt 1 und 2 abgeschlossen sind, führen Sie das Update am Gerät durch.

### 3.1 epoc-Host aktualisieren

- Melden Sie sich als **Administrator** an



- Gehen Sie zu Einstellungen → epoc-Host aktualisieren → Vom Data Manager
- Das Update wird automatisch heruntergeladen
- Das Gerät führt einen automatischen Neustart durch
- Anschliessend erscheint eine Meldung, dass das Software-Update erfolgreich durchgeführt wurde

### 3.2 epoc-Reader aktualisieren

- Sie sind bereits als **Administrator angemeldet**
- Gehen Sie zurück zu **Einstellungen**
- Öffnen Sie die **Reader-Einstellungen**
- Klicken Sie auf „**Aktualisieren**“

Es erscheint die **Suche nach Readern**

- Wählen Sie den gewünschten **Reader** aus
- Verbinden Sie sich mit dem Reader
- Klicken Sie auf „**Update starten**“

Nach Abschluss erscheint eine Meldung, dass der **Reader auf dem neuesten Stand ist**

### Abschluss

Das Software-Update (Host und Reader) ist nun vollständig abgeschlossen